

# ViscoPlus®Gel

## Описание

Гиалуронат натрия является 2,5%-ным вязко-эластичным стерильным и прозрачным однодозовым раствором для инъекции в полость сустава. Гиалуронат натрия высокой степени очистки растворен в физиологическом буферном растворе с рН 6,8-7,6.

## Объем упаковки

Один предварительно заполненный шприц, содержащий 3 мл стерильного раствора препарата (ViscoPlus®Gel) для инъекции.

## Состав содержимого одного шприца

Каждый шприц с 3 мл препарата ViscoPlus®Gel содержит:  
гиалуроната натрия (полученного в процессе брожения) 75 мг  
хлорида натрия 24,9 мг  
натрия фосфата двухзамещенного дигидрата 4,2 мг  
калия фосфата однозамещенного 0,78 мг  
Вода для инъекции

## Показания

Лечение легкого или средне-тяжелого артроза коленного и тазобедренного сустава.

## Способ применения и дозы

ViscoPlus®Gel вводят путем инъекции в пораженный сустав один раз в неделю. Минимальный курс – 1 инъекции, максимальный - 2 инъекций. Возможно одновременное введение препарата в несколько суставов. Циклы лечения можно повторять по мере необходимости с интервалами не менее 6 месяцев. Извлеките предварительно заполненный шприц из упаковки. Вращая колпачок, снимите его и немедленно установите нужную иглу (например, 19 G или 21 G). Соблюдайте правила асептики при открытии иглы и снятии колпачка со шприца.

## Противопоказания и меры предосторожности

Не применяйте у пациентов, у которых ранее была зарегистрирована гиперчувствительность к компонентам препарата ViscoPlus®Gel. Введение ViscoPlus®Gel противопоказано пациентам с наличием инфекционного процесса в полости сустава, а также страдающих системными воспалительными заболеваниями. Препарат не следует применять в фазе активного воспаления сустава. Введение ViscoPlus®Gel возможно после купирования явлений воспаления. Введение препарата ViscoPlus®Gel может выполнять только

квалифицированный медицинский работник (ортопед, ревматолог или специалист той же квалификации). Дозировку назначает врач, который уточняет ее индивидуально для каждого пациента. Шприц предназначен только для одноразового применения. Шприц следует использовать немедленно после вскрытия упаковки. Перед введением препарата в сустав удалите излишек синовиальной жидкости. Препарат ViscoPlus®Gel следует вводить точно в суставную полость. Избегайте введения препарата в кровеносные сосуды и окружающие ткани. Следует соблюдать общие меры предосторожности, установленные для внутрисуставных инъекций. Не применяйте препарат в случае повреждения упаковки или однодозового шприца.

#### **Вынести отдельно:**

Отсутствует достаточный опыт применения гиалуроновой кислоты у детей, а также беременных и кормящих женщин. Применение препарата ViscoPlus®Gel в этих случаях следует обсудить с врачом.

#### **Взаимодействие ViscoPlus®Gel с другими препаратами**

На протяжении курса лечения препаратом ViscoPlus®Gel не вводите в сустав анестетики или другие фармацевтические препараты.

#### **Примечание**

- Содержащийся в шприце раствор для инъекции стерилен. При хранении и транспортировке шприц защищен контурной ячейковой упаковкой и картонной коробкой.
- Наружная поверхность предварительно заполненного шприца чиста, но не стерильна.
- Не применяйте шприц в случае повреждения предварительно заполненного шприца или контурной ячейковой упаковки. При введении препарата следует строго соблюдать правила асептики.
- **Препарат ViscoPlus®Gel не содержит птичьего белка.**
- Хранить при температуре от +2 °С до +25 °С. Не замораживать. Беречь от прямого освещения.
- Срок хранения указан на этикетке и маркировке шприца и картонной упаковке препарата.
- Препарат предназначен только для применения врачом.
- Хранить препарат в месте, недоступном для детей!